

この使用説明書をよく読んでから使用してください

## 脂質標準血清

【製造番号】 000

【使用期限】 0000.00

** * *	項目	試薬名	表示値	標準物質 (供給機関)
	総コレステロール	アクアオート カイノス T-CHO試薬 (酵素法)	000 mg/dL	SRM911 (NIST)
	中性脂肪	アクアオート カイノス TG-II試薬 (酵素法:遊離グリセロール消去法)	000 mg/dL	JCCRM 224 (ReCCS)

## 【使用目的】

総コレステロール、中性脂肪測定試薬の標準血清

## 【問い合わせ先】

株式会社カイノス 学術部  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18  
☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

## 【試薬の調製方法】

- 1) 本製品に精製水を3 mL加え、緩やかに転倒混和して完全に溶解してください。
- 2) 溶解後は、蓋をしめて2~10°C保存で1週間使用できます。

## 【操作上の注意】

- 1) サンプルカップ等に小分けして、ご使用ください。
- 2) 弊社測定用試薬以外への適用に際しては、試薬の検量線が原点を通り、表示濃度まで直線性があることを確認してください。

## \* 【使用上又は取扱い上の注意】

- 1) 本製品は原料としてウシ血清が含まれています。動物由来ウイルス等の存在を完全に否定する方法はありませんので、感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。
- 2) 使用にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
- 3) 感染を避けるため、口によるピペッティングを行わないでください。
- 4) 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください
- 5) 本製品を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。
- 6) 検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものとして適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム (0.1%以上、1時間以上浸漬)、グルタルアルデヒド溶液 (2%、1時間以上浸漬) による消毒処理又はオートクレーブ (121°C、20分以上) による滅菌処理を行ってください。
- 7) 本製品が漏出又は飛散した場合、感染の危険があるものとして消毒処理又は滅菌処理を行ってください。
- 8) 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。


## 【保管方法】

保管方法 : 2~10°C 冷暗所保存  
(使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

## 【包装単位】

製品名	管理コード	包装
脂質標準血清	STS2270	3 mL用× 4

製造販売元


**株式会社カイノス**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485