

この使用説明書をよく読んでから使用してください

線溶系マルチコントロール II

【製造番号】：000

【使用期限】：'00.00

**【表示値】

項目	測定試薬名	単位	参考表示値	許容幅	
血漿中FDP	NSオートP-FDP (タイプK)	μg/mL	0.00	0.00	～ 0.00
D-Dダイマー	LATECLE Dダイマー試薬	μg/mL	0.00	0.00	～ 0.00
FX III	NSオートFX III (タイプK)	%	0.00	0.00	～ 0.00

**【使用目的】

「NSオートP-FDP (タイプK)」、「LATECLE Dダイマー試薬」及び「NSオートFX III (タイプK)」の精度管理にご使用ください。
各項目の濃度は製造番号毎に異なりますので、【表示値】をご確認ください。

【問い合わせ先】

株式会社カインス 学術部
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18
☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

【試薬の調製方法】

本品1バイアルに精製水を0.5 mLを加え、10分静置後、緩やかに転倒混和し、完全に溶解してください。

**【使用上又は取扱い上の注意】

- 1) 本製品については、HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体陰性であることが確認されておりますが、現時点ではどのような試験法を用いても、人由来の血液製剤により絶対に感染しないという保証をすることは不可能です。従って、患者検体と同様、感染の危険性があるものとして取り扱いには充分注意してください。
- 2) 検体や本製品に付着した器具等は検体と同様、感染の危険性のあるものとして取扱ってください。
- 3) 使用にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
- 4) 感染を避けるため、口によるピペッティングを行わないでください。
- 5) 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。
- 6) 本製品を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。
- 7) 検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものとして適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム (0.1%以上、1時間以上浸漬)、グルタルアルデヒド溶液 (2%、1時間以上浸漬) による消毒処理又はオートクレーブ (121°C、20分以上) による滅菌処理を行ってください。
- 8) 本製品が漏出又は飛散した場合、感染の危険があるものとして消毒処理又は滅菌処理を行ってください。
- 9) 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

【貯蔵方法・有効期間】


貯蔵方法：2～10°C 遮光

有効期間：1年間 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

【包装単位】

製品名	管理コード	包装
線溶系マルチコントロール II	CR-8800	0.5 mL用× 5

製造販売元


株式会社カインス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485