

この使用説明書をよく読んでから使用してください

Micro ALB標準液

【使用目的】

尿中アルブミンの検量線作成 (KITAS Micro ALB試薬の標準液)

* 【キットの構成および表示値】

構成試薬	自社基準	IRMM ERM-DA470k基準
標準液A	0.0 mg/L	0.0 mg/L
標準液B	5.0 mg/L	5.4 mg/L
標準液C	10.0 mg/L	10.8 mg/L
標準液D	50.0 mg/L	54.0 mg/L
標準液E	300 mg/L	324 mg/L
標準液F	800 mg/L	864 mg/L

IRMM ERM-DA470k基準は補正係数1.08を乗じて算出した値です。
ご使用になる単位が「mg/dL」の場合は10で除した値をお使いください。

【特徴】

1) ヒト血清アルブミンを成分としています。

【操作上の注意】

- 1) サンプルカップ等に小分けし、使用ください。
- 2) 本製品を他の容器に移した場合、再び元の容器に戻さないでください。値が変動する場合があります。

【使用方法】

- 1) そのまま使用してください。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上 (危険防止) の注意
 - 1) 本製品には、ヒト由来成分が含まれています。HBs抗原、HCV抗体及びHIV抗体の検査を行い、陰性の結果を得ておりますが、感染の危険性を完全に否定できる検査法がありません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に取扱いには十分注意してください。
 - 2) 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- 1) 本製品は凍結を避け、貯法に従い保存してください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られないことがあるので使用しないでください。
- 2) 開封後は蓋をしめて2~10℃で保存してください。
- 3) ラベルに記載されている使用期限内に使用してください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 検体に接触した器具、試薬及び試薬容器等は感染の危険があるものとして処理してください。
- 2) 使用後の容器を廃棄する場合は、貴施設の廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物又は産業廃棄物等を区別して処理してください。
- 3) 本製品を廃棄する場合は、水質汚濁防止法等の関連法規に従って処理してください。
- 4) 本製品が漏出又は飛散した場合は、少量のときは吸水紙等で拭き取り、大量のときは水で洗い流してください。
- 5) 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法 : 2~10℃

有効期間 : 12ヵ月 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

【包装単位】

製品名	管理コード	包装
Micro ALB標準液	STS0960	2 mL× 6 (6濃度)


【問い合わせ先】

株式会社カインス 学術部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18

☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

製造販売元

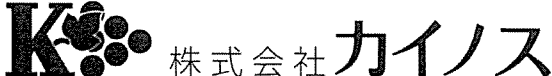

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485