

Dダイマー標準品

注：この使用説明書をよく読んでから使用してください。

1. 使用目的

本製品は、ヒト安定化フィブリンより精製した分画を添加調製し凍結乾燥したものです。
「LATECLE Dダイマー試薬」測定用キャリブレーターです。
本製品の表示値は、容器ラベルに記載してあります。

※ 2. 使用方法

本品1バイアルにDダイマー／FXⅢ希釈液（別売：STS8500）1.0 mLを加え、10分静置後、緩やかに転倒混和し、完全に溶解してください。

3. 取り扱い上の注意

ヒト血液製剤の取り扱い

本製品については、HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体陰性であることが確認されておりますが、現時点ではどのような試験法を用いても、人由来の血液製剤により絶対に感染しないという保証をすることは不可能です。従って、患者検体と同様、感染の危険性があるものとして取り扱いには充分注意してください。また、検体や本製品に付着した器具等についても、感染の危険性のあるものとして取り扱ってください。

4. 貯法（有効期間）

2～10℃で遮光保存
1年間有効

5. 包装

管理コード	包装
STS8200	1 mL用×5

—— 製造販売元 ——



株式会社 **カインス**

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-18 ☎ 03(3816)4480

※ 2013年 12月改訂（第2版）
2003年 8月作成（第1版）

TTS8200 (2A355)