

この使用説明書をよく読んでから使用してください

DG Gel Sol

(DG Gel カード用低イオン強度緩衝液)

【全般的な注意】

- 1) 本製品は血液型判定用の補助的試薬です。これ以外の目的に使用しないでください。
- 2) 使用説明書に記載以外の使用方法については保証を致しません。
- 3) 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

【形状・構造等（キットの構成）】

- 1) DG Gel Sol : 低イオン強度緩衝液
グリシン 1.37%
グルコース 0.85%

【使用目的】

赤血球浮遊液の作成、凝集反応の増強 (DG Gel カード用)

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取方法
 - 1) 採血前の患者への特別な処置は不要です。
 - 2) 検体として赤血球を使用してください。
検体は抗凝固剤を添加した血液から採取し、検査はできるだけ新鮮な検体を使用してください。直ちに検査できない場合は冷蔵 (2～8℃) で保存してください。
 - 3) ACD、CPD、CPDA又はSAG-マンニトールにより採血した赤血球は冷蔵 (2～8℃) で保存すれば、血液バックに記載の有効期限まで使用することができます。この場合、赤血球浮遊液を調製する前に生理食塩液で赤血球を洗浄してください。
2. その他
 - 1) DG Gel カードで測定する場合、正しい測定結果を得るために、DG Gel Sol以外の希釈液を赤血球の浮遊に使用しないでください。
 - 2) 指示した濃度と異なる赤血球浮遊液は、偽陰性又は偽陽性の原因となることがあります。
 - 3) 試薬や検体の添加量は使用するDG Gel カードの添付文書に記載の操作方法に従ってください。

【用法・用量（操作法）】

1. 試薬の調製方法
そのまま使用してください。
必要に応じ、室温 (18～25℃) に戻してから使用してください。
2. 操作法
 - 1) 使用するDG Gel カードの操作方法に従ってください。
 - 2) DG Gel Solは用手法だけでなく、全自動機器 (WADiana Compact、Erytra) で使用することができます。自動機器で使用する場合は、機器の使用説明書を参照してください。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上 (危険防止) の注意
 - 1) 血清等の検体はHIV、HBV、HCV等の感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。また、検体に接触した器具等は検体と同様、感染の危険性のあるものとして取扱ってください。
 - 2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
 - 3) 感染を避けるために口によるピペティングを行わないでください。
2. 使用上の注意
 - 1) 本製品は凍結を避け、貯法に従い保存してください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られないことがあるので使用しないでください。
 - 2) 高温状態で保管された製品は、正しい検査結果が得られない可能性があるため使用しないでください。
 - 3) 極度の濁りを生じた試薬は、汚染や変質のおそれがあるので、使用しないでください。
 - 4) 微生物の汚染に注意して取り扱ってください。汚染が疑われる場合は使用しないでください。
 - 5) 容器が破損や劣化している場合、内容物が漏出している場合は使用しないでください。
 - 6) ラベルに記載されている使用期限内に使用してください。
3. 廃棄上の注意
 - 1) 検体に接触した器具、使用済みの試薬、廃液などは感染の危険があるものとして適切な滅菌処理などを行なったうえで廃棄してください。
 - 2) 本製品を廃棄する場合は、水質汚濁防止法等の関連法規に従って処理してください。
 - 3) 本製品が漏出又は飛散した場合、少量の時は吸水紙等で拭き取り、大量の時は水で洗い流してください。

* 【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法 : 2～8℃

有効期間 : 18ヵ月 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

【包装単位】

製品名	管理コード	包装
DG Gel Sol	DGC0354	100 mL×2

** 【問い合わせ先】

株式会社カイノス 学術部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18

☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

製造販売元



株式会社 カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485